



Brugsanvisning

Handicaptrappelift CJ225P

Til lige og buede trappeløb

Tillykke med jeres nye trappelift.

Trappeliften er fuldautomatisk og beregnet til kørestolsbrugere og gangbesværede.

Trappeliften er godkendt af Arbejdstilsynet.

Vi ønsker dig og jer god fornøjelse med produktet. Er der spørgsmål, er du/I meget velkommen til at kontakte os på 39565862.

ANVENDELSESOMRÅDE/SIKKERHEDSFORSKRIFTER.



Trappeliften er fuldautomatisk, beregnet til transport af kørestolsbrugere og gangbesværede.

Tilladelig belastning på platformen : 225 kg.

Trappeliften er ikke konstrueret til nogen anden form for brug end det foran anførte.

Det må, med andre ord, frarådes at anvende trappeliften i andre forbindelser.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk


Øvrige sikkerhedsforskrifter:



- Læs brugervejledningen før liften anvendes.
- Liften er godkendt til transport af én person eller én person i rullestol.
- Brug ikke liften i tilfælde af brand.
- Brug ikke liften hvis der er forhindringer på- eller nær ved trappen.
- Hold løsthængende tøj væk fra køreskinnen under transport.
- Hold hænderne væk fra køreskinnen under transport.
- Sid aldrig på sikkerhedsbommene under kørsel eller i det hele taget, da det kan medføre mekaniske skader, der ikke dækkes af garantien.
- Væsker og objekter af enhver art, skal til enhver tid holdes væk fra liftens åbninger.
- Aflås altid liften, så børns leg med liften eller anden misbrug undgås.
- Fjern ikke skiltning der har forbindelse til liften.
- Legemsdele eller dele fra rullestolen skal holdes inden for platformen under transport.
- Lav ingen unødvendige bevægelser under transport.
- Foretag aldrig indgreb i liftens konstruktion.
- Stop omgående liften, hvis der er forhindringer på trappe eller køreskinne.
- Der skal være tilstrækkelig elektrisk lys på trappen. Lyset må ikke være tidsstyret.
- Liften må ikke benyttes, hvis der er eksplosionsfare.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



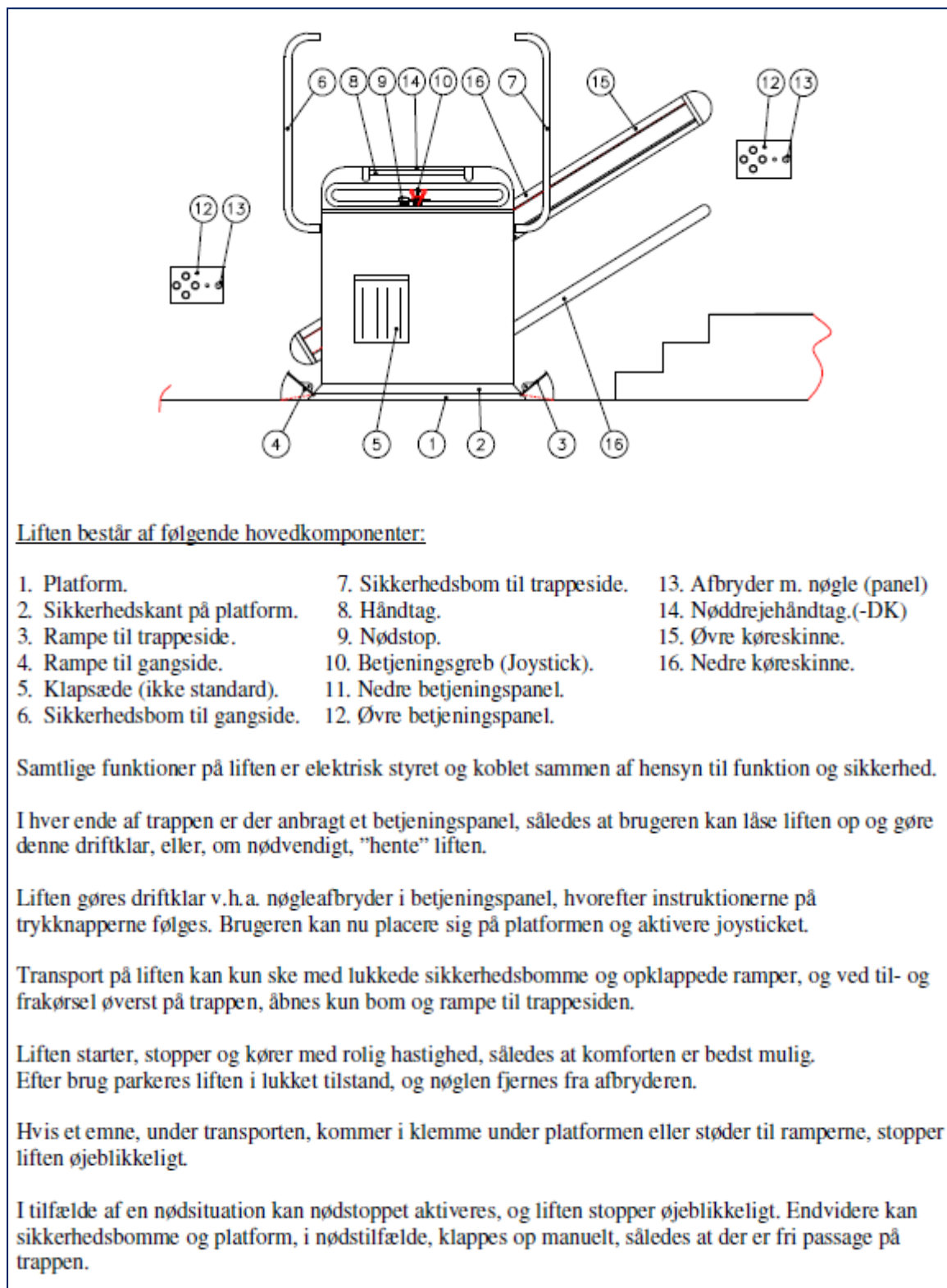

Liften består af følgende hovedkomponenter:

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Platform. | 7. Sikkerhedsbom til trappeside. | 13. Afbryder m. nøgle (panel) |
| 2. Sikkerhedskant på platform. | 8. Håndtag. | 14. Nøddrejehåndtag.(-DK) |
| 3. Rampe til trappeside. | 9. Nødstop. | 15. Øvre køreskinne. |
| 4. Rampe til gangside. | 10. Betjeningsgreb (Joystick). | 16. Nedre køreskinne. |
| 5. Klapsæde (ikke standard). | 11. Nedre betjeningspanel. | |
| 6. Sikkerhedsbom til gangside. | 12. Øvre betjeningspanel. | |

Samtlige funktioner på liften er elektrisk styret og koblet sammen af hensyn til funktion og sikkerhed.

I hver ende af trappen er der anbragt et betjeningspanel, således at brugeren kan låse liften op og gøre denne driftklar, eller, om nødvendigt, "hente" liften.

Liften gøres driftklar v.h.a. nøgleafbryder i betjeningspanel, hvorefter instruktionerne på trykknapperne følges. Brugeren kan nu placere sig på platformen og aktivere joysticket.

Transport på liften kan kun ske med lukkede sikkerhedsbomme og opklappede ramper, og ved til- og frakørsel øverst på trappen, åbnes kun bom og rampe til trappesiden.

Liften starter, stopper og kører med rolig hastighed, således at komforten er bedst mulig. Efter brug parkeres liften i lukket tilstand, og nøglen fjernes fra afbryderen.

Hvis et emne, under transporten, kommer i klemme under platformen eller støder til ramperne, stopper liften øjeblikkeligt.

I tilfælde af en nødsituation kan nødstopet aktiveres, og liften stopper øjeblikkeligt. Endvidere kan sikkerhedsbomme og platform, i nødstilfælde, klappes op manuelt, således at der er fri passage på trappen.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Situation 1: Liften befinder sig allerede ved påstigningsstedet.

Situation 2: Liften befinder sig ved den anden ende af trappen og skal "hentes".

Situation 1:

A. Liften er parkeret, med opslået platform, og skal gøres driftklar.



Liften er parkeret, med opslået platform.

B. På det nærmeste betjeningspanel, sættes nøglen i nøgleafbryderen og drejes, til grøn lampe lyser.

Herefter tages nøglen ud og medbringes under kørslen.

C. Tryk på knappen "Åben" på betjeningspanelet, og hold den inde, indtil platformen er helt nede.



Find mere inspiration på
cj-montage.dk




D. Sikkerhedsbomme åbner og ramper sænker sig automatisk, således der er fri adgang til liften.




E. Kør ind på platformen.

F. Tryk joysticket i den retning kørslen skal foregå, og hold det der.

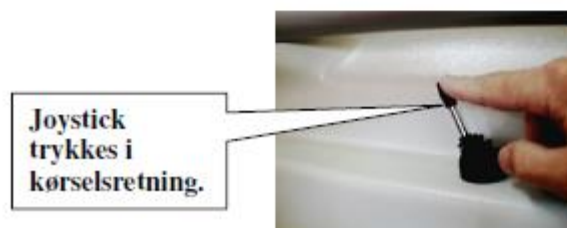

G. Sikkerhedsbomme lukker og ramper hæves automatisk, hvorefter liften starter og vedbliver at køre indtil trappens anden ende nås, eller så længe joysticket er aktiveret.

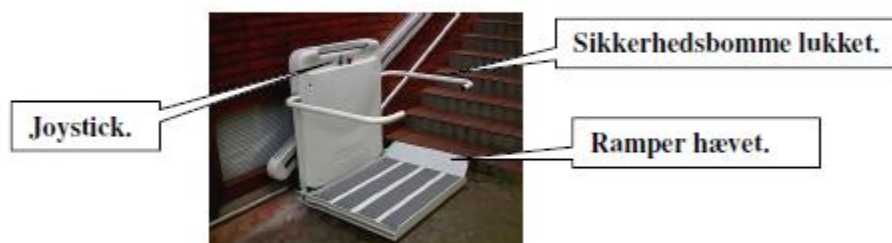

NB. Hvis deres lift er en såkaldt "Hæve-Sænke"-model, vil liften først hæve eller sænke vertikalt hvorefter den påbegynder kørsel.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk




H. Liften stopper automatisk ved enden af trappen og joysticket kan slippes. Sikkerhedsbomme åbnes og ramper sænkes automatisk.



I. Kør af platformen.

J. Tryk på knappen "Luk" på betjeningspanelet, og hold den inde, indtil platform er slået helt op. Liften er i parkeringsposition.

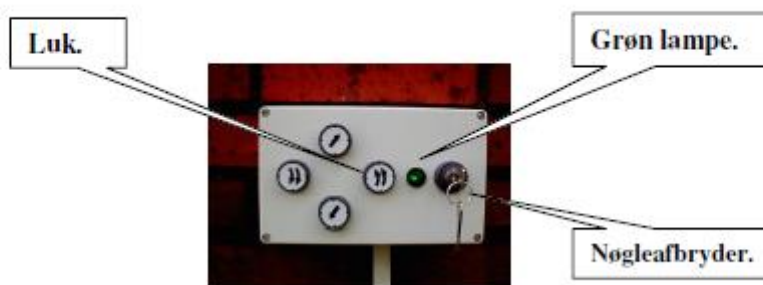

K. Inden liften forlades, sættes den medbragte nøgle i nøgleafbryderen på det nærmeste betjeningspanel og drejes, til grøn lampe slukkes. Liften er nu aflåst.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



Situation 2: Liften befinder sig ved den anden ende af trappen og skal "hentes".

Situation 2:

A. Liften er parkeret, ved den anden ende af trappen, med opslået platform, og skal "hentes".



Liften er parkeret, med opslået platform.

B. På det nærmeste betjeningspanel, sættes nøglen i nøgleafbryderen og drejes til grøn lampe lyser. Herefter tages nøglen ud og medbringes under kørslen. Afhængig af hvor man befinder sig, trykkes på "Op" eller "Ned" - knappen, som holdes inde, indtil liften er ankommet.




Herefter følges vejledningen fra punkt C til K under beskrivelsen af situation 1.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk




SIKKERHED I FORBINDELSE MED BRUG


- Liften kører kun når liften er tændt, og joysticket er påvirket.
Hvis joysticket slippes, stopper liften automatisk.

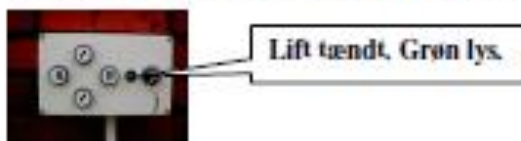

- Sikkerhedsbomme og ramper lukker automatisk, når joysticket aktiveres.
Liften kan først køre, når sikkerhedsbomme og ramper er på plads.

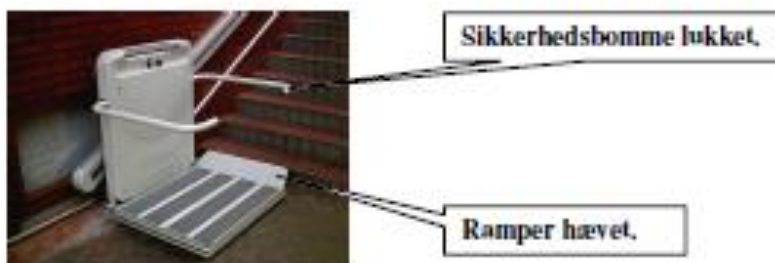

- Liften stopper automatisk i toppen og bunden af trappen.
- Når brugeren skal køre af og på liften øverst på trappen, er det kun sikkerhedsbommen og rampen, nærmest trappen, der åbnes. (Ekstra sikkerhed)

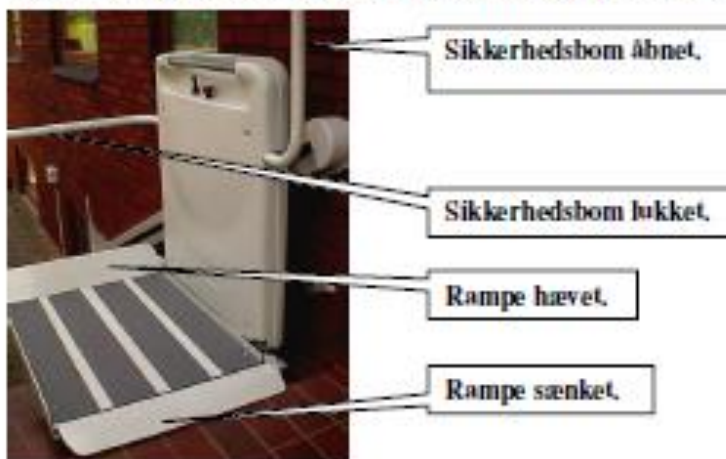

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



- **OBS!! Vent altid med at køre af liften, til ramperne er helt nede og har fuld understøtning på trappen.**



Rampe skal være sænket helt ned mod trappe.

- Hvis der, under kørslen, klemmes noget fast under platformen eller ramperne presses opad, stopper liften automatisk.
Kør liften fri, ved at køre i modsat retning, og fjern den eventuelle forhindring.



F.eks. en bold i klemme så rampe presses op.



Platformen presses op.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk






- Sikkerhedsbommene stopper automatisk, hvis de forhindres i at bevæge sig frit. Bommene genstartes ved at aktivere joysticket.



Bommen forhindres i at bevæge sig frit

- **Liften er forsynet med en rød nødstopknap.** Når knappen trykkes ned, stoppes alle liftens funktioner øjeblikkeligt. Nødstoppet forbliver nedtrykket, og holder alle funktioner afbrudt. Nødstoppet frigøres med en drejebewægelse (med uret).
- **Nødstoppet må kun anvendes ved en faresituation, og ikke som en almindelig stopknap.**

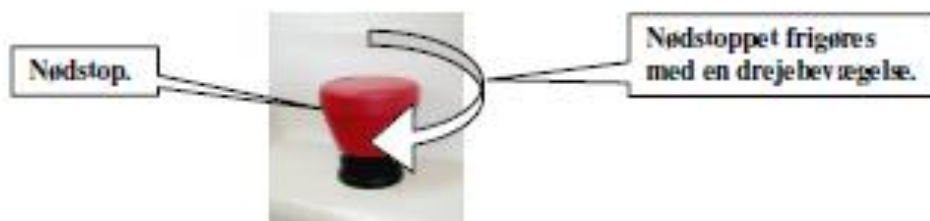

- Liften er i øvrigt forsynet med al lovpligtig og godkendt udstyr, således at sikkerheden, under alle forhold, er den bedst tænkelige.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk

NØDBETJENING

Hvis strømmen svigter:

- Afbryd hovedafbryderen.



Afbryd, ved at dreje på knappen.

- Sikkerhedsbommene kan udløses manuelt, ved altid først at trykke dem ind og dernæst dreje, som billedet viser. Der er nu fri passage til at blive hjulpet ned fra platformen. **Husk, altid at dreje bommene tilbage til vandret position, ellers kan liften ikke automatisk køre videre.**



Drej bommen op med en rolig bevægelse. Efter at liften er ryddet, før bommene tilbage til vandret position.

Tryk altid ind her på bommens krumning. Og hold bommen inde.

- Platformen kan udløses manuelt, ved at dreje platformen op i lodret position, således at der er fri passage på trappen.



Drej platformen op med en rolig bevægelse, og hold den der.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



I tilfælde af brand (Hurtig evakuering):

- Sikkerhedsbomme kan udløses manuelt, ved at trykke dem ind og dreje, som billedet viser. Der er nu fri passage til at blive hjulpet ned fra platformen.



Drej bommen op med en rolig bevægelse. Efter at liften er ryddet, før bommene tilbage til vandret position.

Tryk altid ind her på bommens krumning. Og hold bommen inde.

- Platformen kan udløses manuelt, ved at dreje platformen op i lodret position, således at der er fri passage på trappen.



Drej platformen op med en rolig bevægelse, og hold den der.

Sikkerhedsstop på grund af over hastighed:

- Liften har en indbygget overhastighedsvagt (mekanisk faldlås), som automatisk stopper liften, hvis den tilladelige hastighed overskrides. BC lift a/s eller andet servicefirma skal kontrollere liften, før den igen må tages i brug.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



NØDSTOP

Luften kan **altid** stoppes ved hjælp af nødstoppet. Nødstoppet er og skal være let tilgængeligt, og det er derfor muligt, at aktivere dette ved en fejltagelse. Sker dette, skal nødstoppet blot frigøres ved en drejebewægelse, og man kan igen aktivere joysticket og køre videre.



Nødstoppet frigøres med
en drejebewægelse.



Find mere inspiration på
cj-montage.dk

FEJLFINDING

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Nøglen sættes i afbryder og drejes uden lampe lyser.	- Strømforsyningen til liften er afbrudt på hovedafbryder. - Sikringer er defekte. - Lampe er defekt. - Nødstop aktiveret	- Tilslut hovedafbryder, kontroller sikringerne eller tilkald hjælp. - Skift sikringerne eller tilkald hjælp. - Lampe skiftes eller tilkald hjælp. - Udløs nødstop.
Liften er tændt, men kører ikke.	- Nødstop er aktiveret. - Overhastighedsvagt udløst. - Liftens sikkerhedssystem (bomme/rampe/platform) er aktiveret. - Joystick beskadiget	- Udløs nødstop. - Tilkald service. - Tilkald hjælp, fjern forhindring og genstart. - Tilkald service.
Liften er tændt, men kan ikke "hentes".	- Nødstop er aktiveret. - Overhastighedsvagt udløst. - Liftens sikkerhedssystem (bomme/rampe/platform) er aktiveret. - Betjeningspanel beskadiget.	- Udløs nødstop. - Tilkald service. - Tilkald hjælp, fjern forhindring og genstart. - Tilkald service.
Liften kører og stopper pludselig.	- Nødstop er blevet aktiveret. - Overhastighedsvagt udløst. - Liftens sikkerhedssystem (bomme/rampe/platform) er aktiveret. - Strømforsyning til liften er blevet afbrudt.	- Udløs nødstop. - Tilkald service. - Tilkald hjælp, fjern forhindring og genstart. - Kontrollér hovedafbryder og sikringer eller tilkald hjælp.

Find mere inspiration på
cj-montage.dk



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE.



Rengøring foretages efter behov, og kun med en fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel.

OBS!!!!

**FORETAG ALDRIG AFVASKNING MED SPULESLANGE ELLER
HØJTRYKSRENSER.**



Find mere inspiration på
cj-montage.dk